



Schwangerschaft und Stillzeit

Inhaltsverzeichnis

ELANEE Produkte für Schwangerschaft und Stillzeit.....	3
Schwangerschaft.....	3
Stützgürtel für Schwangere.....	3
Stillzeit.....	4
Wie ist die Brust aufgebaut?.....	4
Wichtiges zur Muttermilch.....	5
Das ELANEE Stillsortiment - ein Überblick	6
Basissortiment.....	7
Brustwarzensalbe.....	7
Ultradünne Stilleinlagen.....	8
Molton-Stilleinlagen.....	9
Waschbare Wäscheschutz-Stilleinlagen - Premium - ...	9
Seide-Wolle-Stilleinlagen 2-lagig.....	10
Seide-Wolle-Stilleinlagen 3-lagig.....	10
Muttermilchbeutel.....	11
Spezialsortiment.....	12
Waschbare Silber-Stilleinlagen.....	12
Hydrogelpads.....	12
Brustmassage-Gerät.....	13
Brust-Ringe.....	14
Anwendungsempfehlung bei akuten Problemen.....	15

In den ersten Lebensmonaten ist Muttermilch die beste Nahrung für Ihr Baby. Stillen bedeutet aber auch Liebe, Kuscheln und Zärtlichkeit und hat eine Vielzahl an Vorteilen für Mutter und Kind.

In dieser Broschüre finden Sie wichtige Informationen darüber, was bei Ihnen und Ihrem Baby vor sich geht. Dann sind Sie in kurzer Zeit ein eingespieltes Stillteam.



ELANEE Produkte für Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

ELANEE Stützgürtel für Schwangere

Mit **fortschreitender Schwangerschaft** und wachsendem Babybauch steigt auch die zu tragende Last. Durch das Gewicht des Kindes wird der Bauch der werdenden Mutter immer mehr nach unten gezogen. Diese starke Belastung der Wirbelsäule kann folglich zu Rückenschmerzen und Ziehen im Bauch führen. Der Körperschwerpunkt verschiebt sich nach vorn und die Verlagerung ins Hohlkreuz, zum Ausgleich der Dysbalance, ist unausweichlich.

Muskeln und Bänder werden durch die falsche Haltung enorm beansprucht. Mit Hilfe eines Stützgürtels werden Rücken- und Beckenbodenmuskulatur entlastet und die gesunde Körperhaltung unterstützt. Auch **vorbeugend** gibt er dem wachsenden Bauch Halt und der Trägerin ein Gefühl von Sicherheit und Komfort. Bauch und Baby werden in belastenden Situationen gestützt.

Nach der Geburt sind Wirbelsäule und Rücken im Ungleichgewicht. Durch das weitere Tragen wird die Bauchwand stabilisiert und gestärkt, um die natürliche Regeneration zu unterstützen.

Vorteile des ELANEE Stützgürtels für Schwangere:

- Entlastet die Rücken- und Beckenbodenmuskulatur
- Reduziert Rückenschmerzen
- Stützt den Bauch für mehr Sicherheit und Komfort
- Leichte Reinigung durch Handwäsche




Größe	Bauchumfang
Größe S	unter 100 cm
Größe M	100-108 cm
Größe L	108-116 cm
Größe XL	über 116 cm

Stillzeit

Wie ist die Brust aufgebaut?

Die weibliche Brust besteht aus Bindegewebe und einem Drüsenkörper, der von Fettgewebe umgeben und von Blutgefäßen, Nerven und Lymphgefäßen durchzogen ist.

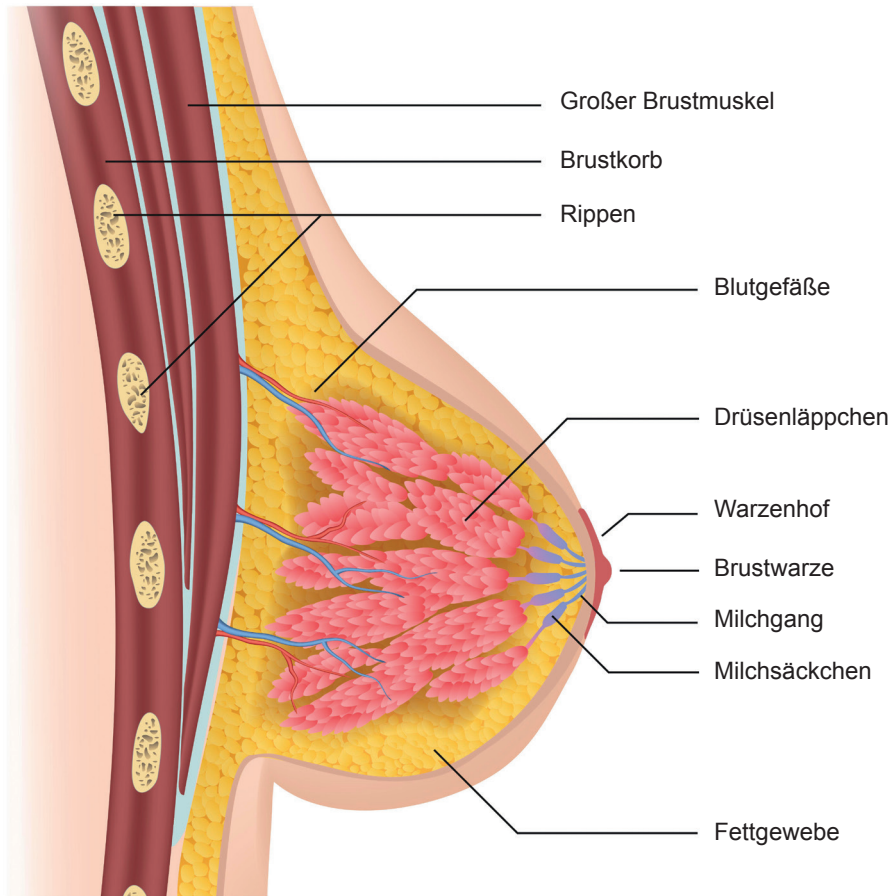

Die Brustdrüse, in der die Muttermilch produziert wird, besteht aus einem festen, runden und abgeplatteten Körper. Zusammengesetzt ist sie aus 15 bis 20 traubenförmigen Drüsenläppchen, die jeweils über einen Milchgang mit der Brustwarze verbunden und um sie herum sternförmig angeordnet sind. Vor dem Warzenhof und der Brustwarze erweitern sich die Milchgänge zu Milchsäckchen, die eine Pumpfunktion beim Stillen übernehmen.

Wichtiges zur Muttermilch

Muttermilch ist an jedem Ort, zu jeder Zeit und kostenlos verfügbar. Sie hat immer die richtige Temperatur und ist keimfrei. Über 200 Bestandteile in der Milch passen sich an die Bedürfnisse Ihres wachsenden Babys an.

Als Kolostrum, auch Vormilch genannt, wird die erste Milch bezeichnet, die schon während der Schwangerschaft produziert wird und Ihrem Baby in den ersten Tagen nach der Geburt zur Verfügung steht. Sie hat eine dickflüssige, gelbliche Konsistenz und enthält alles was Ihr Kind zu Beginn braucht. Auf das Kolostrum folgt ca. am 3. Tag nach der Geburt die Übergangsmilch. Diese Umstellung spüren Sie mit dem Milcheinschuss. Die Milchproduktion setzt nun richtig ein und für gewöhnlich schwellen die Brüste stark an und werden wärmer, schwerer und empfindlicher. Die Milch ist

nun dünnflüssiger und enthält einen höheren Anteil an Fetten und Zucker. Zwei bis drei Wochen nach der Geburt entwickelt sich die reife Muttermilch, die zwar weniger Eiweiße enthält, nun aber voll mit wertvollen Fetten, Kohlenhydraten und Vitaminen ist. Sogar während des Stillens ändert sich die Zusammensetzung der Muttermilch. Zu Beginn des Stillvorgangs fließt die Vormilch, die sehr viel Wasser enthält und dazu dient den Durst des Babys zu stillen. Nach etwa fünf Minuten wird die Konsistenz dickflüssiger, der Zuckergehalt nimmt ab und der Fettgehalt steigt auf das Dreifache an, um den Hunger zu stillen. Diese Milch wird als Nachmilch bezeichnet. Damit Ihr Baby nicht nur die Vormilch, sondern auch die sättigende Nachmilch bekommt, ist es wichtig, es an jeder Brust mindestens zehn Minuten trinken zu lassen.

Muttermilch auf Vorrat

Möchte man Muttermilch für bestimmte Situationen vorrätig haben, unregelmäßigen Milchfluss kompensieren oder auch Milchstau vorbeugen, gibt es Tipps und Tricks für die richtige Lagerung der Milch. Sie können die Muttermilch im Kühlschrank oder in der Gefriertruhe aufbewahren. Gleichgültig welche Option Sie bevorzugen, sollten Sie das Gefäß immer mit dem Abfülldatum und Uhrzeit sowie gegebenenfalls dem Namen Ihres Kindes, wenn es in der Krippe

gefüttert wird, beschriften. Bei einer Raumtemperatur bis 26°C ist die Muttermilch sechs bis acht Stunden haltbar. Wenn Sie die Milch bei einer Maximaltemperatur von 4°C kühlstellen, können Sie diese bis zu fünf Tage lagern. Bleibt die Temperatur im Tiefkühler konstant bei -18°C, können Sie die Milch bis zu sechs Monate aufbewahren. Diese Temperatur- und Zeitangaben beziehen sich auf frische, nicht bereits aufgetaute Muttermilch.



Tipp

Wechseln Sie die Brust erst nach fünf bis zehn Minuten, damit Ihr Baby auch die nährreiche Nachmilch bekommt.

Das ELANEE Stillsortiment - ein Überblick

Produkt	Produktbeschreibung	Anwendungszeitraum			
		1. Trimester	2. Trimester	3. Trimester	Stillzeit
ELANEE Basissortiment					
Brustwarzen-Salbe	Zur Pflege beanspruchter Brustwarzen. Bei normalem bis starkem Milchfluss anwendbar. Kein Abwaschen vor dem Stillen notwendig.				
Ultradünne Stilleinlagen	Anwendung bei normalen, gesunden Brustwarzen. Bei normalem bis starkem Milchfluss anwendbar. Einmalprodukt.				
Molton-Stilleinlagen	Anwendung bei normalen, gesunden Brustwarzen. Bei normalem Milchfluss anwendbar. Reinigung durch Maschinenwäsche bei 95° C möglich.				
Waschbare Wäscheschutz-Stilleinlagen - Premium -	Sicherer und diskreter Wäscheschutz. Bei normalem bis starkem Milchfluss anwendbar. Reinigung durch Maschinenwäsche bei 40° C im Schon-Waschgang möglich.				
Seide-Wolle-Stilleinlagen 2- oder 3-lagig	Anwendung bei beanspruchten Brustwarzen, luftzirkulierend. Bei leichtem (2-lagig) und normalem (3-lagig) Milchfluss anwendbar. Reinigung durch Handwäsche möglich.				
Muttermilchbeutel	Zum hygienischen und sicheren Aufbewahren und Einfrieren von Muttermilch. Einmalprodukt.				
ELANEE Spezialsortiment					
Waschbare Silber-Stilleinlagen	Bleiben antibakteriell und sind kühlend. Bei leichtem bis normalem Milchfluss anwendbar. Reinigung durch Handwäsche möglich.				
Hydrogelpads	Anwendung bei wunden, rissigen Brustwarzen zur Förderung der Heilung. Nicht zum Auffangen von Milch geeignet. Einmalprodukt.				
Brustmassage-Gerät	Zur Lockerung des Brustgewebes und zur Anregung des Milchflusses. Mit feuchtem Tuch abwischbar.				
Brust-Ringe	Schutz der Brustwarze vor Außenberührung durch Hohlagerung. Nicht zum Auffangen von Milch geeignet. Einmalprodukt.				

Basissortiment

Bei der Wahl des passenden Stillzubehörs spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Neben dem gesundheitlichen Aspekt, also dem Vorbeugen von Brustentzündungen durch das Trocken- und Sauberhalten der Brustwarzen, sind auch einige andere Eigenschaften entscheidend. Bei Stilleinlagen spielen Saugfähigkeit, der Pflegeaufwand, die Sichtbarkeit unter der Kleidung, aber auch ökologische Aspekte wie das Vermeiden von Müll bei jeder Frau eine mehr oder weniger bedeutende Rolle. Für jede Frau sind allerdings das Auslaufen von Muttermilch und das Auftreten von Gerüchen unangenehm. Je nach Situation bietet ELANEE ein vielfältiges Sortiment an hochwertigen Stilleinlagen und Pflegeprodukten.

ELANEE Brustwarzen-Salbe

Besonders in den ersten Stillwochen leiden viele Frauen unter stark beanspruchten Brustwarzen. Durch falsches oder zu häufiges Anlegen können die Brustwarzen wund werden. Die „**ELANEE Brustwarzen-Salbe**“ wirkt vorbeugend bereits in der Schwangerschaft und pflegend während der Stillzeit. Die Kombination rein natürlicher Inhaltsstoffe sowie der Zusatz von Vitamin E regenerieren und pflegen die zarte Haut. Die Salbe enthält reines, hochqualitatives Lanolin und der Zusatz an Sonnenblumenöl macht sie wunderbar geschmeidig. ELANEE Brustwarzen-Salbe ist so rein und natürlich, dass sie nicht vor dem Stillen abgewaschen werden muss. Sie ist in einem 30 ml Airless-Spender sowie in einer 10 ml Tube erhältlich.

Vorteile der ELANEE Brustwarzen-Salbe:

- Spendet Feuchtigkeit
- Pflegt wunde und rissige Brustwarzen
- Rein natürliche Inhaltsstoffe
- LAP® -Lanolin (low allergens and pestizide Lanolin) ist besonders gut verträglich
- Frei von Farb- und Duftstoffen
- Optimal dosierbar dank Airless-Pumpspender
- Kein Abwaschen vor dem Stillen nötig

Unsere ELANEE Brustwarzen-Salbe enthält LAP®-Lanolin (low allergens and pestizide Lanolin). Die Salbe enthält keine Konservierungs- und Duftstoffe und kein Butylhydroxytoluol (BHT). Durch den geringen Anteil an freien Wollwachsalkoholen (< 3 %) und dem geringen Pestizidgehalt (< 1,5 ppm) ist die Salbe besonders gut verträglich.



ELANEE Ultradünne Stilleinlagen

Die „**ELANEE Ultradünne Stilleinlagen**“ sind mit weniger als 1,4 mm extrem dünn und sitzen dank ihrer diskreten Passform wie eine zweite Haut. Sie können bis zu 100 ml pro Stilleinlage aufnehmen und bleiben auch bei starkem Milchfluss form- und strukturstabil. Der ultra-saugfähige Kern aus Polymeren schließt die Flüssigkeit im Inneren der Stilleinlage sicher ein. Die atmungsaktive „SOFT-Touch“ Oberfläche und die wasserabweisende Außenseite sorgen für ein trockenes Hautgefühl und schützen zuverlässig die Kleidung. Zwei Fixierstreifen garantieren einen richtigen Sitz der Stilleinlage und bieten viel Bewegungsfreiheit im Alltag. Die ELANEE Ultradünne Stilleinlagen sind hygienisch einzeln verpackt und ideal für unterwegs.



Ultra-Saugfähiger Kern

schließt bis zu 100 ml Flüssigkeit im Inneren sicher ein



Extrem dünne Stilleinlage

(weniger als 1,4 mm dick)



Diskrete Passform



Atmungsaktive „SOFT-Touch“- Oberfläche



Form- und strukturstabil

auch bei starken Milchfluss



Sicherer Halt dank zwei Fixierstreifen



Hygienisch einzeln verpackt

für unterwegs



Wasserabweisende Außenseite

hält die Kleidung zuverlässig trocken

ELANEE Molton-Stilleinlagen

Sind Ihre Brustwarzen nicht beansprucht und der Milchfluss leicht bis normal bieten sich die „**ELANEE Molton-Stilleinlagen**“ aus 100 % Baumwolle als kostengünstige und umweltbewusste Alternative zu Einwegprodukten an. Die Einlagen sind angenehm weich und sorgen dank ihrer drei Lagen für einen sicheren Schutz der Wäsche. Sie sind bei 60 – 95° C in der Maschine waschbar und darüber hinaus auch bei Wollunverträglichkeit sehr gut geeignet.



Vorteile der ELANEE Molton-Stilleinlagen:

- Angenehm weich und saugstark
- Umweltbewusste und kostengünstige Alternative
- Besonders pflegeleicht
- Bei 95° C waschbar
- Optimal bei Wollunverträglichkeit

Waschbare Wäscheschutz - Stilleinlagen - Premium -

Die „**ELANEE Waschbaren Wäscheschutz-Stilleinlagen**“ sind besonders dünne, dabei saugstarke und waschbare Stilleinlagen. Das äußerst aufnahmefähige Material trägt nicht unnötig auf und fühlt sich angenehm weich an. Die waschbare Stilleinlage bietet diskreten Wäscheschutz bei hoher Saugkraft. Sie sind nahtlos verarbeitet, um Druckstellen an der empfindlichen Brust zu vermeiden. Die einzigartige Struktur des Materials nimmt austretende Milch sofort auf und verteilt die Flüssigkeit durch feine Kanäle im Inneren der Stilleinlage. So bleiben die Brustwarzen sauber und trocken. Die beschichtete Außenseite mit einem Netzstoff verhindert ein Durchnässen selbst bei stärkerem Milchfluss und reduziert das Verrutschen der Stilleinlage.

Vorteile der ELANEE Wäscheschutz- Stilleinlagen - Premium -:

- Diskret und saugstark
- Wäscheschutz dank wasserabweisender Schicht
- Nahtlose Verarbeitung verhindert Druckstellen
- Netz-Rückseite verhindert ein Verrutschen der Stilleinlagen
- Umweltbewusste Alternative zu Einwegprodukten
- Bei 40° C waschbar



Seide-Wolle-Stilleinlagen

Stark beanspruchte Brustwarzen können sich besonders gut direkt an der Luft regenerieren. Die Seide und die besondere Strickweise der „**ELANEE Seide-Wolle-Stilleinlagen 2-lagig**“ sorgen bei leichtem bis normalem Milchfluss für eine gute Luftzufuhr. Die Seide-Seite (zum Körper hin) ist mit einem rosa Faden gekennzeichnet.



PZN:
12433744



Tipp

Lassen Sie nach dem Stillen oder Abpumpen die letzten Milchtropfen auf Ihren Brustwarzen trocknen. Die fetthaltige Nachmilch pflegt und schützt gesunde Brustwarzen und ist ein wirkungsvolles Heilmittel bei strapazierten, wunden oder rissigen Brustwarzen.

PZN:
12433738



Bei den „**ELANEE Seide-Wolle-Stilleinlagen 3-lagig**“ sorgt eine zusätzliche Schicht Wolle für eine sichere Flüssigkeitsaufnahme. Die Verwendung der 3-lagigen Stilleinlage empfiehlt sich deshalb bei normalem Milchfluss.



ELANEE Muttermilchbeutel

Damit unabhängig von Ihren Lebensumständen die Versorgung mit Muttermilch gewährleistet werden kann, empfiehlt sich die Verwendung der „**ELANEE Muttermilchbeutel**“. Sie ermöglichen ein hygienisches und sicheres Einfrieren, Aufbewahren und Transportieren von bis zu 180 ml abgepumpter Muttermilch. Auf diese Weise bleiben Sie als Mutter mobil und können die Versorgung Ihres Kindes flexibel gestalten.

Vorteile des ELANEE Muttermilchbeutels:

- frei von Bisphenol A
- vorsterilisiert
- gefriergeeignet
- lebensmittelecht & geschmacksneutral
- kein Auslaufen dank doppeltem Sicherheitsverschluss
- mit einem übersichtlichen Beschriftungsfeld versehen
- mit einer Maßangabe versehen

Tipp

Erwärmen Sie Muttermilch niemals in der Mikrowelle. Dadurch können wertvolle Inhaltsstoffe verloren gehen und die Milch kann stellenweise zu heiß werden.



Beschriftungsfeld



Mengenangabe durch Messskala



Doppelter Zip-Verschluss

Spezialsortiment

ELANEE Waschbare Silber-Stilleinlagen



Die „**ELANEE Waschbare Silber-Stilleinlagen**“ wirken kühlend und lassen eine Luftzirkulation zu. Sie sind weich und reiben nicht an der empfindlichen Haut. So können sich beanspruchte Brustwarzen schnell erholen. Der in den Stilleinlagen verarbeitete biozide Wirkstoff Silber (CAS-Nr. 7440-22-4) vermindert aufgrund der antibakteriellen Aktivität die Besiedlung und Vermehrung von Mikroorganismen in der Stilleinlage und beugt einer Geruchsentwicklung vor.

ELANEE Hydrogelpads

„**ELANEE Hydrogelpads**“ fördern die Heilung wunderr und rissiger Brustwarzen und wirken angenehm kühl und schmerzlindeend. Die Pads stellen eine Barriere zwischen der Brustwarze und der Wäsche dar und schützen so die empfindlichen Brustwarzen. Das kühle Gel verschafft sofortige Linderung und beschleunigt den Heilungsprozess durch das Prinzip der feuchten Wundheilung. Hydrogelpads verkleben nicht mit der Wundoberfläche, sie sind schmerzfrei zu entfernen und beschädigen nicht die neu gebildete Hautschicht beim Wechseln der Auflage.



ELANEE Brustmassage-Gerät

Das ELANEE Brustmassage-Gerät ist ein vibrierendes Massagegerät und für die weibliche Brust während der Schwangerschaft und Stillzeit geeignet. Das Brustmassage-Gerät dient der wohltuenden Massage und fördert die Durchblutung des Brustgewebes. Dadurch kann das Brustgewebe besser versorgt werden. Der Milchfluss wird angeregt und Verhärtungen können gelockert werden. Das Brustmassage-Gerät besitzt sechs unterschiedliche Programnstufen, welche sich durch verschiedene Stärken und Pulsierungen unterscheiden. Die Wahl der Stufe hängt vom eigenen Wohlbefinden ab.




Die Form des Geräts ist optimal an die Brustform angepasst. Es wird mit der Hand an die Brust angelegt und in kleinen kreisenden Bewegungen oder aus allen Richtungen vom Brustansatz bis zur Brustwarze bewegt. Durch die sechs Programme mit unterschiedlichen Vibrationsstärken kann selbst bestimmt werden, welche Vibrationsstärke in diesem Moment gut tut.

Vorteile des ELANEE Brustmassage-Geräts:

- Zur sanften und wohltuenden Massage der weiblichen Brust
- Mit 6 unterschiedlichen Programnstufen
- Form des Geräts ist optimal an die Brustform angepasst
- Zur angenehmen Lockerung des Brustgewebes
- Fördert die Durchblutung des Brustgewebes
- Kann zu einer Verbesserung der Brustentleerung führen




Drei verschiedene Empfehlungen zur Brustmassage:

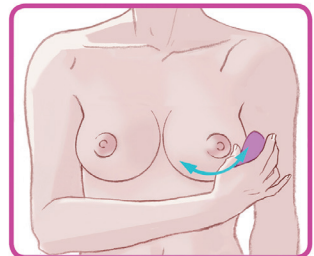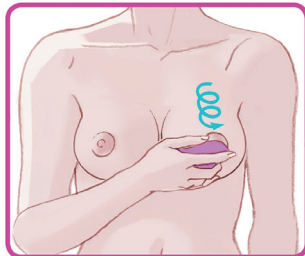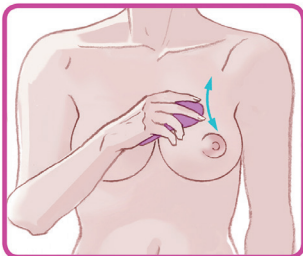


ELANEE Brust-Ringe


Wenn Berührungen oder jeglicher Textilkontakt mit den Brustwarzen nicht nur unangenehm, sondern akut schmerzhaft sind, bieten die „**ELANEE Brust-Ringe**“ einen optimalen Schutz. Neben den ärztlich-therapeutischen Anweisungen sind unsere Brust-Ringe eine Ergänzung, um die wunden Brustwarzen durch Hohl-lagerung und gleichmäßigen Druckausgleich während der Wundheilung zu unterstützen.

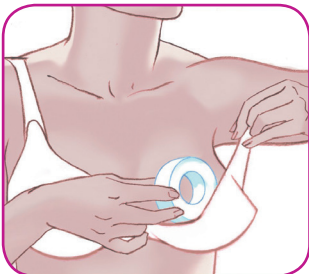

Die Ringe werden direkt auf die Brust in den BH gelegt. Zur Pflege der Brustwarzen kann eine Brustwarzen-Salbe aufgetragen werden. Zum Schutz der Kleidung vor Durchnässen ist das Einlegen der ELANEE Ultradünnen Stilleinlagen zwischen den Brust-Ringen und der Kleidung empfehlenswert.

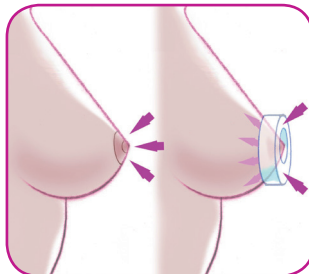


Die besondere Birnenform der Brust-Ringe polstert die Brust optimal ab und sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung. Die kreisförmige Ausprägung bei den Brust-Ringen sichert die Luftzufuhr und entlastet dennoch die schmerzende Brustwarze vor Außenberührungen oder Kontakt.

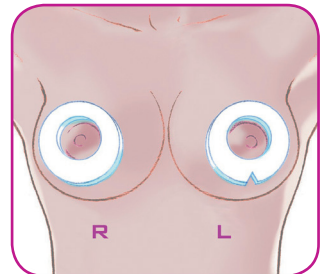

Ein Brust-Ring-Paar besteht aus 2 Schaumstoff-Ringen, die für die linke Brustseite mit und für die rechte Seite ohne Kerbe gekennzeichnet sind. Ein wechselseitiges Anstecken mit entzündungserregenden Keimen kann so vermieden werden.

Anwendungsempfehlung bei akuten Problemen

Schritt 1: Pflege der Brustwarzen

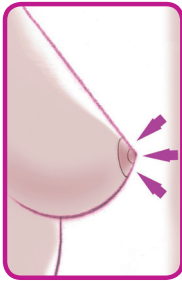


ELANEE Brustwarzen-Salbe

Zur Pflege trockener und rissiger Brustwarzen ist unsere ELANEE Brustwarzen-Salbe empfehlenswert. Hochwertiges LAP®-Lanolin ohne Konservierungs- und Duftstoffe ist durch den geringen Anteil an freien Wollwachsalkoholen ($< 3\%$) und dem geringen Pestizidgehalt ($< 1,5\text{ ppm}$) besonders gut verträglich. Die ELANEE Brustwarzen-Salbe bildet die Grundlage des Konzeptes und sorgt für Geschmeidigkeit und Elastizität der gestressten Hautpartien.



Schritt 2: Schutz und Druckentlastung

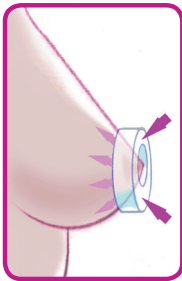


ELANEE Brust-Ringe

Um die Brustwarze vor physikalischen Einflüssen, wie scheuernder Kleidung oder BH-Kontakt zu schützen, haben wir die ELANEE Brust-Ringe entwickelt. Sie sorgen für eine Hohlagerung der Brustwarze und dank ihrer Birnenform für eine gleichmäßige Druckverteilung. Die Regeneration kann dadurch unterstützt und die Wundheilung schmerzender Brustwarzen verbessert werden.



Schritt 3: Trockenhalten durch Aufsaugen

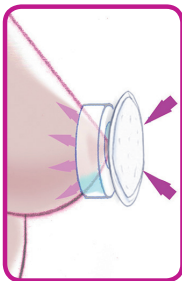

ELANEE Ultradünne Stilleinlagen

Natürlich soll auch bei entzündeten Brustwarzen austretende Milch sicher und diskret aufgenommen werden. Hier bilden unsere ELANEE Ultradünnen Stilleinlagen den Abschluss des Konzeptes. Sie sind weniger als 1,4 mm dick und der ultrasaugfähige Kern schließt bis zu 100 ml Flüssigkeit im Inneren sicher ein. Sie werden einfach zwischen den Brust-Ringen und dem BH eingelegt und dank der zwei Klebepunkte sicher am BH fixiert. Die Kleidung bleibt dank der wasserabweisenden Außenseite schön trocken. Natürlich können die ELANEE Ultradünnen Stilleinlagen auch für den normalen Stillalltag verwendet werden.





Artikel-Nr.	Pharmazentralnummer (PZN) / Hilfsmittelnummer	Beschreibung
208-00	12433738	Seide-Wolle-Stilleinlagen 3-lagig
211-00	12433744	Seide-Wolle-Stilleinlagen 2-lagig
214-00	12433767	Molton-Stilleinlagen
217-00	auf Anfrage	Waschbare Wäscheschutz-Stilleinlagen - Premium -
218-00	12433796	Waschbare Silber-Stilleinlagen
219-00	12433750	Ultradünne Stilleinlagen
220-00	11561983	Hydrogelpads
222-00	11562008/99.35.01.0001	Brust-Ringe
223-00	14312594	Brustmassage-Gerät
402-00	12433804	Brustwarzensalbe 30 ml Airless-Spender
403-00	12433833	Brustwarzensalbe 10 ml Tube
710-00	12433856	Muttermilchbeutel
751-00	12433684 /05.11.03.5010	Stützgürtel für Schwangere:
752-00	12433690 /05.11.03.5010	Größe S
753-00	12433709 /05.11.03.5010	Größe M
754-00	12433715 /05.11.03.5010	Größe L
		Größe XL

Mehr Information zum gesamten ELANEE Sortiment finden Sie auf unserer Homepage:
www.elanee.de



IB-011-04

GRÜNSPECHT Naturprodukte GmbH
 Produktbereich ELANEE
 Münchener Str. 21
 85123 Karlskron, Germany

Tel.: 08450/68033-00
 Fax: 08450/68033-10
post@elanee.de
www.elanee.de